

CIRULIQPOLL

"DESINCRUSTANTE ALCALINO, DESINCRUSTANTE PARA MATERIAL CIRÚRGICO "INSTRUMENTAIS, VIDRARIAS EQUIPAMENTOS" "LIQUIDO ALCALINO" "

MODO DE AÇÃO	Moderno detergente líquido com capacidade própria para previamente remover incrustações em material cirúrgico e utensílios laboratoriais. Pela ação conjugada de seus componentes tensoativos reage com todo tipo de partículas orgânicas, desprendendo-as e fragmentando-as, liberando-as de todos os tipos de materiais.
USADO EM	Lavagem de materiais cirúrgicos e materiais de enfermagem em geral, dos blocos de cirurgias, das salas de parto, dos pronto-socorros, de clínicas odontológicas, de clínicas veterinárias, de centros de saúde, etc.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se quer uma desincrustação com baixo custo, com rápida velocidade, com produto não corrosivo.
OUTROS USOS	Limpeza de manchas em tecidos e pisos.
PRINC. ATIVO	Tensoativos + alcalinizantes + desincrustantes.
INDICADO PARA	Remoção de incrustações diversas: sangue, hemoglobina, fibrina, pus, secreções, fezes, urina, coágulos, pigmentos orgânicos, corantes, etc. indicado inclusive para peças com feridas e ranhuras, desprendendo totalmente os detritos aderidos ao instrumental.
DILUIÇÃO	Diluir 01 litro do produto em 30 a 100 litros de água, dependendo do grau de sujidade e do grau que se deseja deixar o equipamento.
PREPARO	Usar o produto diluído em água. Preparar uma solução do produto utilizando recipientes de plásticos, vidros ou inox, a qual deve ser preparada a cada dia e desprezada no final de cada dia.
APLICAÇÃO	Mergulhar completamente os materiais na solução com auxílio de uma pinça, mexendo-os com uma espátula e após 15 minutos de ação retirá-los e enxaguá-los. Repetir a operação caso necessário. Usar abundantemente água para enxaguá-los e deixá-los secar antes de serem esterilizados.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto sempre que necessário, isto é, sempre que for lavar os instrumentais, sem se preocupar com os desgastes pois o produto é anti-corrosivo, mesmo com longo tempo de uso, se usado adequadamente.
RENDIMENTO	Com 01 litro do produto se podem lavar 1.000 a 2.000 peças.
VANTAGENS	(1) Dispensa a esfrega e escovagem que dão atrito indevido que danifica os materiais (2) Rápida ação (3) Grande capacidade de diluição em água (4) Biodegradável (5) Não ataca o metal base dos materiais cirúrgicos (6) Não é oxidante e nem agressivo (7) Econômico por ser de alto e extremo rendimento.
COMPOSIÇÃO	Ácido Sulfônico, Lauril éter, sulfato de sódio, Nonil fenol etoxilado, Sequestrante, Alcanilizante, Umectante, Solvente, Antioxidante, Fragância, Conservante e veículo.
PROPRIEDADES	Líquido alcalino, transparente, PH= 8 - 10, com baixa espumação, forte poder anti-oxidante, biodegradável, suave aroma de limão, não alérgico, semi transparente, com reação alcalina à pele, não inflamável.
TOXIDEZ	BAIXA

CUIDADOS	PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. CENTRO DE INTOXICAÇÕES: (CETOX 0800-722-6001)
E.P.I.	Óculos protetivos e luvas ambos de borracha, apenas como medida preventiva.
SUBSTITUTOS	Detergentes, sabões e outros produtos específicos ou inespecíficos bem como substituto de produtos com esta finalidade.
CLIENTES	Hospitais, Clínicas Odontológicas, Clínicas Veterinárias, Clínicas diversas, laboratório de análises clínicas, laboratório veterinário, laboratórios de química e bioquímica.
ESTOCAGEM	Manter em local arejado longe da luz solar direta, sempre na embalagem original lacrada e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. AUT. FUNC./ MS: 3.02321-7 PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.645546/2011-04
VALIDADE	12 meses a partir da data de fabricação.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts.
OPÇÕES	1- Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, espumação, coloração, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que voce desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.